

Speciális arcmaszk – Használati és karbantartási utasítások

Használati útmutató

1. A maszk felhelyezése előtt mosson kezet szappannal és vízzel, lehetőség hiányában legalább alkoholos fertőtlenítőszerrel használjon.
2. Helyezze az arcmaszkot az arca egyik oldalára, a meghajlított szélével erősítse az arcához.
3. Ne érintse meg az anyag elejét, és akassza rá a füleket rugalmas pánt segítségével.
4. Az orr alakja szerint alakítsa ki a maszk megerősített szélét, az orrpántot rögzítse, és húzza a maszk alsó szélét a szája és az álla fölé, hogy a maszkot a lehető legközelebb lehessen illeszteni.
5. Amikor szeretné levenni, a maszkot a gumiszalag segítségével válassza le az arcáról, ne érintse meg a maszk elejét.
6. A maszkot ismételt felhasználásra szánták, felhasználás után az alábbi utasítások szerint mosható.

Karbantartási útmutató

- 1. Mosás:** Gyengéd, agresszív tisztítószer használata nélkül. Például a kereskedelemben kapható mosószappan, folyékony mosószer vagy kozmetikai kéz- és arcszappan használható. Hagyja a szappant legalább egy percig hatni, majd alaposan öblítse le tiszta vízzel. **A maszkot tilos mosógépben mosni, csupán kézi mosás ajánlott! Csak 30 – 40 °C-on mosható!**
- 2. Szárítás:** A maszk nem szárítható szárítóban vagy mikrohullámú sütőben. Normál, szobahőmérsékleten szárítsa meg
- 3. A maszkot tilos vasalni!**
4. Kerülje az arcmaszk megérintését vagy az arcmaszk hosszantartó érintkezését a készülékek felületének forró részeivel, amelyek tartósan megrongálhatják az anyag felületét és a termék ezt követően nem felel meg felhasználói céljának!
- 5. A tisztításhoz ne használjon maró tisztítószerrel, fertőtlenítőszerrel kivéve mosószert!**

MEGJEGYZÉS: Az arcmaszk nem átruházható, és csak egy személy számára használható!

Gyártó: VITA SICURA s.r.o., se sídlem náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČO: 054 18 992

www.vitasicura.cz

E-mail: info@vitasicura.cz

Tel.: +420 778 888 770

CE